

FICHA TÉCNICA

Luva em Látex

PARA PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO

COM PÓ



**Luvas
látex**
com pó



As Luvas de Látex para Procedimento não Cirúrgico com pó **HealthCare**, são essenciais e indispensáveis nas funções exercidas pelos profissionais da Saúde, Higiene e Cosmético. Consideradas (EPI) Equipamento de Proteção Individual, as Luvas **HealthCare** possibilitam a proteção ideal, não estéril, de uso único e com pó biodegradável. As luvas protegem os profissionais formando uma barreira mecânica, reduzindo os riscos de contaminação por contato com materiais biológicos, sangue ou fluidos corporais. Fabricadas com máximo cuidado de modo a oferecer maior resistência e proteção. Produto com **ANVISA**.



Saúde
Segurança



Compulsório



INMETRO

Fabricante: Cross Protection
Anvisa: 81699320008
C.A.: 45.626

INDICAÇÕES DE USO

As Luvas em Látex **HealthCare** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimento não invasivos e não estéreis.

COMPOSIÇÃO

Luva: 100% borracha de látex natural

VALIDADE

Cinco (5) anos após a data da fabricação

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As Luvas Látex HealthCare estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

TAMANHO	COMPRIMENTO MÍNIMO	LARGURA
PP	220 mm	$\leq 80\text{mm}$
P	220 mm	$80 \pm 10\text{mm}$
M	230 mm	$95 \pm 10\text{mm}$
G	230 mm	$110 \pm 10\text{mm}$




APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

TAMANHO	CÓDIGO	QUANTIDADE CARTUCHO	GTIN - 13	ITF-14
PP	5000	100 und	7898912271600	17898912271607
P	5001	100 und	7898912271617	17898912271614
M	5002	100 und	7898912271624	17898912271621
G	5003	100 und	7898912271631	17898912271638

INSTRUÇÕES DE USO

- Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
- Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
- Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- Descartar em local apropriado após o uso.

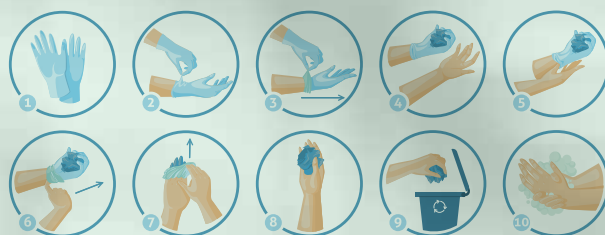

ADVERTÊNCIA PRECAUÇÕES

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu produto pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Alta flexibilidade;
- Alta Resistência durante o uso;
- Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A validade do produto é garantida enquanto a embalagem permanecer íntegra, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto.

As embalagens das Luvas HealthCare devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4° a 40°C, evitando exposição a luz solar, fontes de calor e umidade. Para garantir a qualidade do produto é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam seguidos.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 Sul do Rio – Tijucas / SC.
CEP: 88200-000 | CNPJ: 18.252.904/0001-70

ADMINISTRATIVO

Rua Pref. Dib Cherem, 3440 Capoeiras – Florianópolis – SC.
CEP: 88090-001 | Fone: (48) 3247-5900