



Cânula endotraqueal com, sem balão e aramada Vitalgold

vitalGold

Indicações de uso

A **Cânula endotraqueal Vitalgold** realiza a respiração em pacientes conectados a sistemas respiratórios durante as cirurgias, podendo ser usada em pacientes que perdem a habilidade de respiração. As Cânulas endotraqueal Vitalgold (com balão / sem balão e com balão aramada) possuem escala de 1 em 1 cm de cordas vocais, marcadores radiopaco, componente interno uniforme com olho de Murphy.

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ	78.742.491/0001-33
Autorização	1.02.969-0
Produto	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO VITAL GOLD

Modelo Produto Médico
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 2.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 2.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 3.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 3.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 4.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 5.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 6.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 7.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 8.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 9.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 10
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 4.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 5.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 6.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 7.0
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 8.5
Cânula endotraqueal aramada com balão vital gold tamanho 9.5

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM BALÃO VITALGOLD.pdf	3917363216 - 04/10/2021 18:41:28

Nome Técnico	Canulas
Registro	10296900087
Processo	25351333566201276
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

REGISTRO ANVISA 10296900087



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

(41) 2108-4545

www.joaomed.com.br



Cânula endotraqueal com, sem balão e aramada Vitalgold

vitalGold

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ	78.742.491/0001-33
Autorização	1.02.969-0
Produto	CANULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO VITAL GOLD

Modelo Produto Médico	
CANULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO VITAL GOLD TAMANHOS 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CANULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO VITAL GOLD BEVER.pdf	3819604219 - 27/09/2021 18:30:17

Nome Técnico	Canulas
Registro	10296900058
Processo	25351311222201284
Fabricante Legal	HANGZHOU BEVER MEDICAL DEVICES CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

REGISTRO ANVISA 10296900058

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ	78.742.491/0001-33
Autorização	1.02.969-0
Produto	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO VITAL GOLD

Modelo Produto Médico	
Acessório: guia para intubação.	
Tamanhos: 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO VITAL GOLD.pdf	3917571218 - 04/10/2021 19:02:40

Nome Técnico	Canulas
Registro	10296900093
Processo	25351311131201262
Fabricante Legal	HANGZHOU BEVER MEDICAL DEVICES CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

REGISTRO ANVISA 10296900093

Características do produto

- Produto estéril - Esterilizado a óxido de etileno
- Uso único

Modelos disponíveis em estoque

Modelos cânula com balão

2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0

Modelos cânula sem balão

2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0

Modelos cânula com balão aramada

2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

(41) 2108-4545

www.joaomed.com.br



Cânula endotraqueal com, sem balão e aramada VitalGold

vitalGold

Instruções de uso

Atenção: Antes do uso, inspecionar a cânula e verificar se há algum dano no produto ou na embalagem. Caso houver dano, não utilizar o produto.

1. Abrir a embalagem de forma asséptica.
2. Inserir a cânula, procedendo conforme técnica médica atualmente aceita.
3. Ajustar a posição da cânula corretamente. Isso se dá pela inexistência de ruídos respiratórios em ambos os campos pulmonares e pela inexistência de borborígio no epigástrico.
3. Conectar a cânula ao ambú e/ou ventilador.
4. Fixar a cânula ao paciente segundo as técnicas médicas atualmente aceitas.
5. Verificar a cada 2(duas) horas o posicionamento da cânula, assim como a eficácia de sua utilização. Caso seja detectado qualquer problema, substituir o produto.
6. Extubar o paciente seguindo as técnicas médicas atualmente aceitas.
7. A inserção da cânula endotraqueal poderá ser confirmada pela visualização da posição da ponta do tubo por radiografia.

Composição

As cânulas endotraqueais com balão, sem balão e com balão aramada são fabricadas em:

Tubo: PVC siliconado de uso médico

Balão: PVC siliconado elástico, de alto fluxo e baixa pressão

Conector polipropileno

Válvula ABS

Reforço aramado: Aço cirúrgico (ASI 304) (EC 1907/2009)

Advertências e precauções

- Artigo médico-hospitalar de uso único. Destruir após a sua utilização.
- Ler as instruções antes de usar.
- Não deverá ser reprocessado ou reaproveitado sob hipótese alguma.
- Respeitar sempre o prazo de validade
- Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.
- O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
- Esse produto deverá ser manipulado exclusivamente pelo médico responsável ou habilitado.
- **Contraindicado na utilização em pacientes conscientes, pois poderá causar indução a êmese.**
- **Contraindicado em pacientes que sofram de edema de laringe e/ou ferimento de vértebra cervical e/ou tórax que oprimam a traqueia.**
- **Inflamação de traquéia.**

Validade

- 5 anos após a data de fabricação

Armazenamento, conservação e transporte

- Estocar em local seco e arejado.
- Proteger do calor (temperatura inferior a 30 graus centígrados).
- Proteger de umidade (inferior a 80%).
- Proteger da luz (solar ou artificial potente).
- Acondicionar em sua embalagem original.
- Manter afastado de dispositivos que emitam calor.
- Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar. Deverão estar protegidos e livres de umidade e batidas.



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

☎ (41) 2108-4545

🌐 www.joaomed.com.br



Cânula endotraqueal com, sem balão e aramada VitalGold

vitalGold

Imagens dos produtos

Cânula endotraqueal com balão



Cânula endotraqueal sem balão



Cânula endotraqueal com balão aramada



Embalagens do produto

Cânula endotraqueal com balão

Caixa primária: Papelão liso c/ 10 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 2.0 ao 4.5 com 200 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 5.0 ao 10.0 com 160 unidades.

Cânula endotraqueal sem balão

Caixa primária: Papelão liso c/ 10 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 2.0 ao 4.5 com 200 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 5.0 ao 10.0 com 160 unidades.

Cânula endotraqueal com balão aramada

Caixa primária: Papelão liso c/ 10 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 3.0 ao 4.5 com 200 unidades.

Caixa transporte: Dos tamanhos 5.0 ao 10.0 com 160 unidades.



Embalagem primária
34 x 13cm



Embalagem secundária
34 x 15 x 10cm



Embalagem transporte
50 x 37 x 34cm

Importado e distribuído por

JoãoMed comércio de materiais cirúrgicos Ltda.

CNPJ: 78.742.791/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Junior, 406 - Xaxim - Curitiba - PR

Fabricado por

Hangzhou Bever Medical Devices co., Ltd.



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

(41) 2108-4545

www.joaomed.com.br