



AF do BRASIL
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.



Escova de Robinson

Pincel Cônico

As Escovas de Robinson da AF do BRASIL são fabricadas com cerdas de náilon monofilamento em formato cônico.

A Escova Robinson é indicada para os procedimentos de profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

Possui cerdas macias e abrasivas de monofilamento de nylon 6.0 com medida de 0,18mm, nas cores branca, colorida ou preta. Possui haste para Contra Ângulo (CA).

INDICAÇÃO

Indicado para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 100 unidades de Escova de Robinson Branca Pincel Cônico AF do BRASIL.



nº 80432410029





INSTRUÇÕES DE USO

ESCOVA DE ROBINSON

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A Escova Robinson é indicada para os procedimentos de profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.
- Cerdas Macias e Abrasivas de Monofilamento de nylon 6.0 com medida 018mm;
- Nas cores Branca, Colorida ou Preta;
- Haste para Contra Ângulo (CA).

2. APRESENTAÇÃO

- ESCOVA ROBINSON CA CONICA BRANCA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;
- ESCOVA ROBINSON CA CONICA COLORIDA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;
- ESCOVA ROBINSON CA CONICA PRETA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;
- ESCOVA ROBINSON CA PLANA BRANCA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;
- ESCOVA ROBINSON CA PLANA COLORIDA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;
- ESCOVA ROBINSON CA PLANA PRETA apresentação pode ser com 1 unid, 5 unids, 10 unids , 50 unids ou 100 unids;

3. COMPOSIÇÃO

- Latão – CLA 360, Norma STM 316;
- Cromo Níquel;
- Monofilamento de nylon 6.0 com medida 018 mm.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

5. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- A umidade deve ser mantida numa faixa entre 35° % e 70° UR.



ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO SECO A TEMPERATURA (15°C A 30°C).

6. INSTRUÇÕES PARA USO

Escolher o formato de sua preferência, para a superfície dentária em questão. Conectar a haste (mandril) do produto ao motor de baixa rotação. Para efetuar o procedimento de profilaxia, utilizar como auxiliar pasta profilática ou pó abrasivo.

7. CONTRA INDICAÇÕES:

Não há.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso Odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Esterilizar antes do uso.

9. CUIDADOS ESPECIAIS

Uso profissional, uso único, não estéril, descartar após o uso.

10. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico.

11. INTERAÇÕES

Não há.