

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	04.356.658/0001-91
Autorização	[sem dados cadastrados]
Produto	TAÇAS PARA PROFILAXIA E POLIMENTO

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Inst.Uso Taça de borracha.pdf	2001039212 - 24/05/2021 11:51:28

Nome Técnico	Material de Acabamento e Polimento
Registro	80432410065
Processo	25351254360202111
Fabricante Legal	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



AF do BRASIL
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.

Taça de Borracha

para Profilaxia e Polimento



A Taça de Borracha AF do BRASIL é fabricada com látex com a flexibilidade, dureza e macies ideal para não causar traumas e proporcionar excelente desempenho.

Apresenta um alto desempenho no polimento e higienização da arcada dentária.

Nas cores Branca ou Colorida, com haste para Contra Ângulo (CA).

INDICAÇÃO

Indicado para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 100 unidades de Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento AF do BRASIL.



nº 80432410065





INSTRUÇÕES DE USO

TAÇA DE BORRACHA

Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Taça de Borracha é indicada para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

- Nas cores Branca ou Coloridas;
- Haste para Contra Ângulo (CA).

2. APRESENTAÇÃO

- TAÇA DE BORRACHA E SILICONE PARA PROFILAXIA E POLIMENTO na Cor BRANCA apresentação pode ser com 1 unid, 7 unids, 8 unids, 50 unids ou 100 unids;
- TAÇA DE BORRACHA E SILICONE PARA PROFILAXIA E POLIMENTO COLORIDA apresentação pode ser com 1 unid, 7 unids, 8 unids, 50 unids ou 100 unids.

3. COMPOSIÇÃO

- Latão - CLA 360, Norma STM 316;
- Cromo Níquel;
- Borracha BDP;
- Silicone.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicada para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária.

5. AÇÃO DO PRODUTO

Apresenta um alto desempenho no polimento e higienização da arcada dentária.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- A umidade deve ser mantida numa faixa entre 35° % e 70° UR.



ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO SECO A TEMPERATURA (15°C A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

Coloca-se na caneta de alta rotação e posteriormente aciona-se a caneta para efetuar o procedimento de profilaxia, utilizando-se como auxiliar pasta profilática ou pó abrasivo.

8. CONTRA INDICAÇÕES

Não há.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso Odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções;
- Esterilizar antes do uso.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Uso profissional, uso único, não estéril, descartar após o uso.

11. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

Não há.