


Quando você abre a embalagem sachê onde estão contidas as 3 ou 6 unidades de preservativo individuais, dentro deste sachê existe impresso a instrução de uso do mesmo, que expomos abaixo.

COMO USAR CORRETAMENTE OS PRESERVATIVOS MADEITEX

- Abra o envelope só na hora do uso, de maneira delicada para evitar qualquer danificação.
- Coloque o preservativo na ponta do pênis ereto.
- Nunca desenrole antes de usar.
- Ao colocar aperte a ponta do reservatório com os dedos, evitando assim uma possível ruptura. (Fig. 1)
- O preservativo deve ser desenrolado em toda a extensão do pênis. (Fig. 2)
- Se o preservativo for desenrolado ao contrário, ele não descera a base do pênis, se isto acontecer, jogue-o fora e abra outro preservativo.

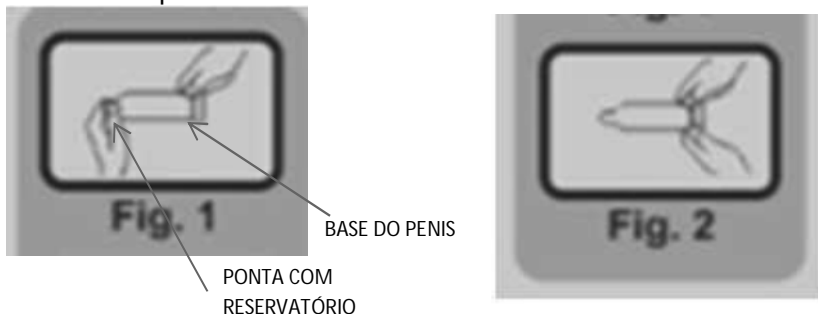

APÓS O ATO SEXUAL

- Retire o pênis ereto lentamente, segurando o preservativo na base para evitar vazamento do esperma

PRECAUÇÕES

- Evite o contato com antissépticos de base oleosa, fenóis e seus derivados de petróleo (tipo vaselina), óleo mineral ou outros materiais incompatíveis com a borracha. Estes danificam o látex, facilitando a ruptura do preservativo. (Óleos, pomadas, cápsulas gelatinosas que contêm óleo perfumado (**cápsulas do amor, bolinhas do prazer, bolinhas explosivas, bolinhas excitantes, bolinhas eróticas**))
- Caso ocorra sexo oral antes do coito, recomenda-se utilizar um novo preservativo.
- Caso o coito seja prolongado, recomenda-se a substituição do preservativo.
- Se você desejar um lubrificante adicional, utilize-o somente a base de água.
- Caso ocorra irritação em qualquer um dos parceiros, o uso deve ser descontinuado. Persistindo os sintomas um médico deverá ser consultado.

ADVERTÊNCIA

- O preservativo **MADEITEX** não é recomendado a qualquer um dos parceiros que sejam sensíveis ao látex de borracha natural.

RECOMENDAÇÕES

- Use o preservativo MADEITEX a cada relação sexual. Jamais utilize-o mais de uma vez.
- Proteja do calor, da umidade e da luz.
- Não utilize objetos cortantes ou pontiagudos para abrir a embalagem.
- Não utilize os dentes para abrir as embalagens.
- Não jogue o preservativo no vaso sanitário. Enrole-o em papel e jogue-o no lixo.
- Não utilize o preservativo com data de validade vencida.
- Os preservativos **MADEITEX** são recomendados no auxílio a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e para o planejamento familiar.
- Nenhum preservativo pode garantir 100% de eficiência. Mesmo assim é o meio mais eficaz que se conhece.