

Active Life® Bolsa de Ostomia de Uma Peça

Sistema de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia

Descrição

As **bolsas Active Life®** são dispositivos de uma peça para colostomia/ileostomia compostas por uma barreira protetora de pele Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável.

As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.



Marca

Active Life® ConvaTec®
Stomahesive®



Composição do Produto

- **Bolsa Coletora:** Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos. As bolsas para ileostomia e colostomia apresentam ainda uma tela externa perfurada de polietileno com acetato de vinila, fixada sobre a superfície da bolsa que fica em contato com a pele.
- **Barreira Protetora da Pele Stomahesive®:** Composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele) e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. A borda microporosa adesiva flexível que circunda a placa adesiva é composta por uma tela de poliéster com adesivo acrílico de grau médico.
- **Clipe de Fechamento:** Polipropileno.

Active Life® Bolsa de Ostomia de Uma Peça

Sistema de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia

Características e Ações do Produto

- **Proteção da pele:** substâncias hidrocolóides absorvem a umidade.
- **Multi-medidas:** recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada.
- **Opção de bolsa transparente:** Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens.
- **Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos:** segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.
- **A borda microporosa adesiva flexível** elimina a necessidade de utilizar adesivos adicionais.
- **A tela perfurada** fixada à parte posterior da bolsa impede o acúmulo de umidade, permitindo a respiração da pele e aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele.

Recomendações de Uso

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.

- Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa. A placa protetora Stomahesive adere à pele escoriada ou úmida; contudo, a borda adesiva flexível só adere à pele seca.
- Se a superfície da pele periestoma estiver irregular ou enrugada, preencher as depressões ou pregas da pele com pasta Stomahesive. O uso rotineiro da pasta protetora Stomahesive ao redor da base do estoma aumenta o tempo de uso da bolsa.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:

- 1) Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- 2) Retirar o plástico protetor que cobre a placa adesiva.
- 3) Traçar o tamanho do estoma no papel protetor, no verso da placa, centralizando no orifício inicial.
- 4) **IMPORTANTE:** Antes de recortar a placa adesiva, separar as partes da frente e de trás da bolsa, a fim de evitar cortar a parte frontal.
- 5) Recortar o orifício inicial do mesmo tamanho ou ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando uma tesoura pequena preferencialmente de ponta curva e o guia de recorte impresso no papel protetor.
- 6) Remover o plástico e o papel protetores da placa adesiva, minimizando o contato dos dedos com a face adesiva
- 7) Desprender o papel protetor dobrando as pregas laterais para trás. NÃO remover completamente o papel das bordas laterais, por enquanto.
- 8) Segurar a bolsa pelos dois lados da placa adesiva com ambas as mãos, mantendo-a na posição vertical e longe do corpo, até que o centro do orifício da placa adesiva esteja posicionado sobre o estoma.
- 9) Pressionar suavemente a placa adesiva contra a pele, principalmente junto à área periestoma.
- 10) Retirar o restante do papel protetor e alisar as bordas laterais sobre a pele para melhorar a aderência.
- 11) Certifique-se de que o clipe de fechamento esteja na posição correta, sem riscos de abertura e possível vazamento do efluente.

Active Life® Bolsa de Ostomia de Uma Peça

Sistema de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura e não houver sinais de irritação.
- Atenção: Deve-se ter especial cuidado ao usar produtos adesivos ao redor de urostomias planas, especialmente se associada à megaureter. Em raras ocasiões, os informes clínicos têm documentado a presença de agentes adesivos no trato urinário destes pacientes. Nesses casos, deve-se avaliar a continuidade do uso do produto e iniciar tratamento clínico apropriado.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA 80523020058	5 anos	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
22771	1003073	768455101610	265681	Transparente	19-64mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento
22773	1181397	768455101627	265670	Opaca	19-64mm	10 bolsas e 1 clipe de fechamento



Fabricante Legal:

ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:

Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:

Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente

0800-7276-115



www.convatec.com

FT-OC01

V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.